



Datum van uitgifte: 23-2-2026
Versie: 1.0

Gebruiksaanwijzing drevel

Identificatie van het medisch hulpmiddel

Productnaam	Drevel voor musculoskeletale behandelingen
Handelsnaam	Drevel
Varianten	Verkrijgbaar in meerdere gewichtsvarianten (440gr, 500gr, 600gr, 700gr, 800gr)
UDI-DI	08720892886101 (440 gram) 08720892886118 (500 gram) 08720892886125 (600 gram) 08720892886132 (700 gram) 08720892886149 (800 gram)
Fabrikant	MSK drevels
Adres fabrikant	Eikenlaan 52, 3831XH Leusden
Contact	info@mskdrevels.nl

Montage drevelhouder

Bij sets van 3 of meer drevels krijgt u een drevelhouder geleverd. Deze bestaat uit twee onderdelen:

1. Een basisplaat met aan de onderkant een gleuf.
2. Een standaard inclusief vijf reservedoppen.

U kunt de standaard in de gleuf schuiven zoals weergegeven in de afbeelding rechtsboven.



Beoogd doel

De drevel is een niet-actief, niet-invasief medisch hulpmiddel dat door gekwalificeerde zorgprofessionals wordt gebruikt om lichte, mechanische tikken op de huid boven de wervelkolom toe te dienen, ter therapeutische ondersteuning bij musculoskeletale behandelingen.

Het hulpmiddel wordt gebruikt in combinatie met een lichte (zand)hamer (niet geleverd door de fabrikant). De drevel bestaat uit een aluminium handvat en een rubberen dop die in contact komt met de huid van de patiënt.

Beoogde gebruikers en patiëntenpopulatie

- Beoogde gebruikers: Artsen en zorgprofessionals met specialisatie in musculoskeletale behandelingen.
- Patiëntenpopulatie: Volwassen patiënten die een musculoskeletale behandeling ondergaan, conform professioneel medisch oordeel.

Indicaties voor gebruik

Therapeutische ondersteuning bij musculoskeletale behandelingen waarbij mechanische stimulatie van het bewegingsapparaat wordt toegepast.

Contra-indicaties

Gebruik de drevel niet bij:

- Acute wervelkolom trauma's of fracturen
- Bekende of vermoede instabiliteit van de wervelkolom
- Osteoporose met verhoogd fractuurrisico
- Infecties, tumoren of andere ernstige pathologie ter hoogte van de wervelkolom
- Huidbeschadigingen of open wonden op de plaats van toepassing
- Allergische reactie van patiënt op natuurlijk rubber

Bovenstaande lijst is niet uitputtend. Gebruik ook altijd uw medisch professionele oordeel om andere contra-indicaties te identificeren.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

 Belangrijke waarschuwing:

- De drevel is uitsluitend bedoeld voor het toedienen van lichte tikken. Hard of krachtig slaan op de wervelkolom of omliggende structuren is niet onderzocht en wordt afgeraden.
- Er bestaat geen wetenschappelijke literatuur die de veiligheid van hard slaan op wervels ondersteunt.
- Het toepassen van hogere krachten dan lichte tikken gebeurt uitsluitend op basis van het professioneel oordeel van de arts en volledig op eigen verantwoordelijkheid.

 Overige waarschuwingen:

- Alleen te gebruiken door gekwalificeerde artsen.
- Gebruik uitsluitend op intacte huid.
- Gebruik geen beschadigde of versleten drevel; met name geen versleten dop.
- Gebruik alleen een lichte hamer; zware hamers vergroten het risico op letsel.
- Bevraag de patiënt op mogelijk aanwezige allergische reactie op natuurlijk rubber.

Mogelijke bijwerkingen

Bij correct gebruik worden geen bijwerkingen verwacht. Onjuist of te intensief gebruik kan echter aanleiding geven tot:

- Pijn of discomfort
- Ecchymose of cutane irritatie
- Mogelijk letsel aan onderliggende weefsels (subcutaan of musculair)

Gebruiksaanwijzing

1. Inspecteer de drevel vóór elk gebruik op beschadigingen.
2. Zorg dat de rubberen dop schoon en intact is.
3. Plaats de rubberen dop loodrecht op de huid boven het beoogde behandelingsgebied.
4. Dien lichte, gecontroleerde tikken toe met een geschikte lichte (zand)hamer.
5. Observeer de reactie van de patiënt continu.
6. Stop de behandeling onmiddellijk bij ongewenste reacties.

Reiniging en onderhoud

- Reinig de drevel met water met een milde zeepoplossing, zoals afwasmiddel.
- Inspecteer met regelmaat de rubberen dop op slijtage. Indien de slijtage dusdanig is dat de werking vermindert of er risico bestaat dat de patiënt met het metaal van de drevel in aanraking komt, moet u de dop onmiddellijk vervangen. Een vervangende dop wordt meegeleverd en kan ook worden aangevraagd via info@mskdrevels.nl.

Opslag en transport

- Bewaar droog en schoon.
- Transporteren in een beschermende verpakking om beschadiging te voorkomen.

Levensduur

Het metalen deel van de drevel hoeft slechts vervangen te worden indien deze zou breken of versplinteren. Hier heeft u bij normaal gebruik ook garantie op (zie de algemene voorwaarden).

De levensduur van de rubberen dop is afhankelijk van frequentie van gebruik en onderhoud en kan daarmee sterk fluctueren.

Oppervlakkige slijtage of krassen op de drevel beïnvloeden de werking niet.

Klachten en incidenten

Ernstige incidenten die verband houden met het gebruik van dit hulpmiddel moeten worden gemeld aan:

- De fabrikant, door te mailen naar info@mskdrevels.nl
- De bevoegde autoriteit (in Nederland: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd)

Wettelijke informatie

Dit hulpmiddel voldoet aan de vereisten van Verordening (EU) 2017/745 (MDR) en is geclassificeerd als medisch hulpmiddel klasse I.

Symbolen

Op het etiket (de begeleidende brief) treft u de volgende symbolen aan. Dit is de betekenis van deze symbolen:

	Adres fabrikant: MSK Drevels Eikenlaan 52, 3831XH Leusden, Nederland
	Identificatienummer van dit hulpmiddel.
	Het lot-/batchnummer van de drevel(s)
	Lees a.u.b. deze handleiding voor veiligheidsinstructies

	Dit product bevat natuurlijk rubber, dat een allergische reactie kan oproepen bij sommige patiënten
	Dit is een medisch apparaat
	Dit hulpmiddel voldoet aan alle eisen voor een klasse 1 medisch apparaat